


Mund-Nase-Maske

\ Beschreibung

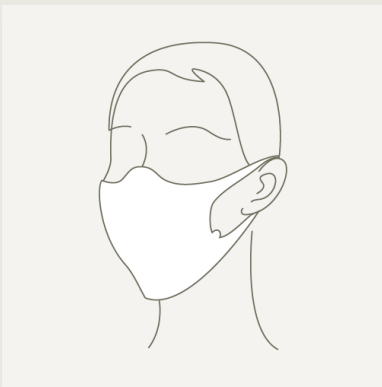

Die Polyvlies Mund-Nase-Maske ist als Einwegartikel für den privaten Gebrauch konzipiert. Sie dient dem Privatanwender zur Bedeckung von Mund und Nase und sollte nach einmaligem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden.

Diese auch „MNB“ genannte Maske ist einlagig, aus nur einem Stück gefertigt und besteht zu 100 % aus speziell behandelten Polypropylenfasern (PP). Damit wird eine Durchfeuchtung spürbar verhindert, eine hohe Atmungsaktivität erzielt und ein dauerhaft angenehmer Tragekomfort bewirkt.

Der eigens entworfene Konturschnitt gewährleistet bei allen Größen eine universelle Passform, um eine optimale Bedeckung und enges Anliegen zu bewirken, ohne das Sichtfeld oder die komfortablen Trageeigenschaften zu beeinträchtigen. Die Kontur enthält außerdem einseitig eine Markierung, um eine Verwechslung der Maskenseiten vermeiden zu können. Die großzügige Nasenausformung kann von Brillenträgern mit dem Gestell so eingeklemmt werden, dass ein Beschlagen der Brille deutlich vermindert wird.

Das Material erfüllt die humanökologischen Anforderungen des OEKO-TEX®, Standard 100 für die Produktklasse I (Babyartikel). Zusätzlich wurde der Maske insbesondere die Atmungsaktivität und Funktionalität durch das LABTECH-Zertifikat bescheinigt.

Außerdem wurde durch das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie nach den Vorgaben des BfArM eine erfolgreiche Produktzertifizierung für die Bereiche Verarbeitungsqualität, Materialbeschaffenheit, Produktionsprozess sowie Tragekomfort durchgeführt und - wie die Verwendung für das Tragen im nahen Personenkontaktbereich zum Schutz anderer Personen - als gut eingestuft. Hierfür wurde zudem das Prüfsiegel 2020 „geprüftes Produkt“ erteilt.

\ Sicherheitshinweise


Diese Mund-Nase-Maske ist kein Medizinprodukt und keine Schutzausrüstung. Sie stellt lediglich einen Einweg-Bekleidungsgegenstand zum privaten Gebrauch dar. Daher darf sie nicht im Gesundheitswesen oder zum Arbeitsschutz verwendet werden. Sie muss sofort nach einmaligem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden. Die gängigen Hygienevorschriften (RKI, BfArM, BZgA) sind weiterhin einzuhalten. Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Menschen sowie die obligatorischen Husten- und Niesregeln eingehalten werden.

Zur sicheren Verwendung bitte unbedingt die rückseitige Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen und beachten!



Mund-Nase-Maske

\ Gebrauchsanleitung

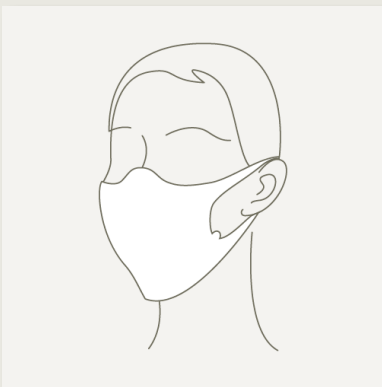

- \ Beim Vorbereiten und Anlegen ist eine Kontaminierung der Masken unbedingt zu vermeiden (vorher nach anerkannten Hygieneregeln gründlich Hände waschen)
- \ Zum Anlegen muss die Maske (ohne Berührung der Innenfläche) mit der Nasenaussparung nach oben, über Nase, Mund und Kinn deckend positioniert werden und durch Überstülpen der Ohrschalen unter leichter Spannung hinter den Ohren fixiert werden (s. Bild)
- \ Während des Tragens sollte die Maske möglichst nicht berührt werden (Sitzkorrekturen und Repositionierungen allenfalls an den Ohrschalen vornehmen)
- \ Zum Abnehmen dürfen nur die Ohrschalen angefasst werden und die Maske ist ohne erneuten Kontakt vorsichtig vom Gesicht zu entfernen
- \ Benutzte Masken dürfen niemals erneut verwendet werden und müssen gemäß den örtlichen Vorschriften sicher entsorgt werden („Restmüll“)
- \ Die Hände sind anschließend sofort nach anerkannten Hygieneregeln zu waschen



Technische Änderungen bleiben vorbehalten

Polyvlies übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden und gewährleistet keinen speziellen Schutz